


## HPJ-1 胶体金检测仪操作流程（单机版）

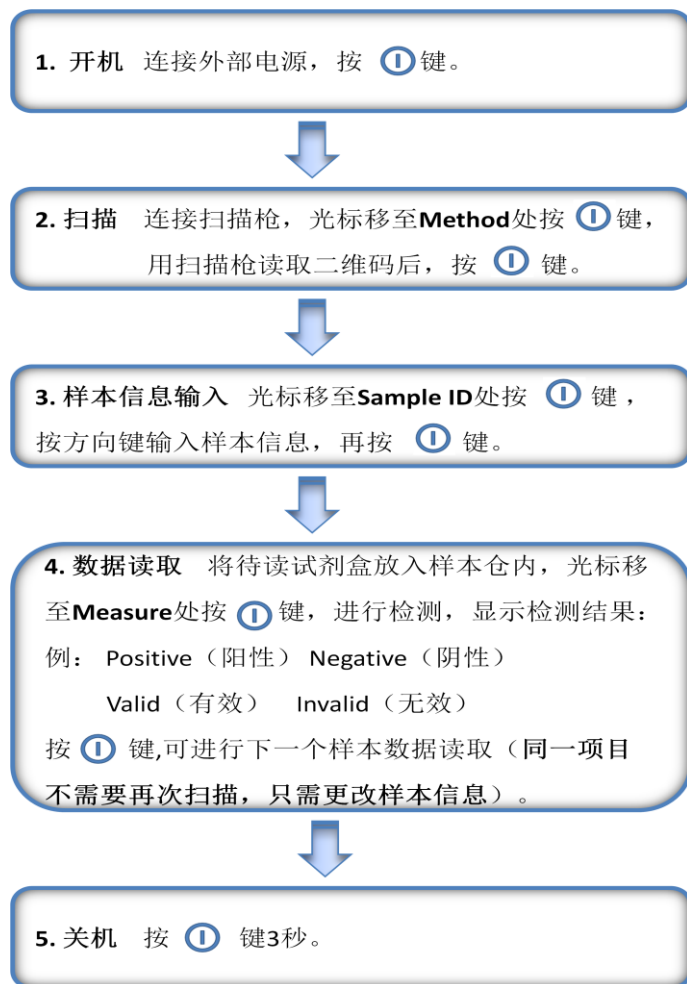

## HPJ-1 胶体金检测仪操作流程（联机版）



### ⚠ 注意事项:

- ① 开机前检查样本仓是否处于封闭状态，不要拉开或有缝隙。
- ② 扫描时，扫描枪距试剂盒二维码上方 10 公分处，“十”字光标对准二维码中心，按下扫描枪键。扫描成功会“滴”的一声，同时读取的信息会出现在界面上。

- ③ 试剂盒加样 100u1，反应 20 分钟后，即可在检测仪上读取数据。
- ④ 试剂盒放入样本仓，需将试剂盒完全卡在凹槽中且加样口朝外。